

Destilador de agua

Manual usuario

(instrucciones técnicas)

Versión número: 2018-09



Runyes®
FOCUS ON DENTAL

Registro

Antes de usar este aparato escribir el modelo y numero de referencia en el espacio destinado.

Modelo: _____ **Número de referencia:** _____

Importante

Antes de operar el destilador, leer el manual cuidadosamente. Le ayudará a obtener un eficiente funcionamiento.

Durante la operación, seguir estrictamente los procedimientos escritos y lleve a cabo una estricta mantención.

Favor guardar este documento para futuras consultas.

Si tiene cualquier problema al usar el equipo, favor contactar al representante. Él le solucionara el problema.

No operar el aparato sin supervisión.

Datos importantes para una operación segura:

220V Solamente

No conectar o desconectar el equipo con las manos húmedas.

No colocar el destilador en una mesa inestable.

Cuando mueva el destilador, saque la cubierta superior y abrace el cuerpo del aparato para efectuar la acción.

Mantener los niños alejados del destilador para evitar el calor.

Desenchufar el aparato al llenarlo de agua, limpiarlo. Desenchufarlo al no estar en uso.

Favor no operar el equipo sin supervisión.

1 Parámetros técnicos

Rated Voltage: 220V 50Hz

Power: 750w Capacity: 4L

Amount Water: 1L/h

Overtemperature fuse: Disconnect Temp. 160 °C

Weight: 3.5kg

Chamber Size: Φ 18.5*19

Packing Size: 470*260*335mm

2 Instrucciones de uso

- 1 Desconecte el cable de la cubierta superior del cuerpo principal del destilador.
- 2 Sostenga la cubierta con las dos manos y tirela hacia arriba. Déjela en un costado.
- 3 Agregue agua corriente en el cuerpo del destilador sin exceder el nivel máximo. Aproximadamente 4 litros (fig 3-2). Asegurarse que no haya nada en la cubeta y que este desconectada (fig 3-3).
El uso de agua caliente puede acortar el tiempo de trabajo.
- 4 Ponga la cubierta superior en el cuerpo principal y conecte el cable de corriente a este.
- 5 Coloque la tapa embudo, (TANK LID) en la boca del tanque de almacenamiento de agua. Y póngalo bajo la salida de agua del destilador. (fig 3-5)
- 6 Encienda el equipo con el interruptor del cable, debe encender la luz. El ventilador comenzara a funcionar. Si no lo hace, presione el botón de encendido del equipo. (fig 3-6)
- 7 Al cabo de media hora comenzara a gotear en el recipiente y los 4 litros de agua se destilarán en aproximadamente 4 horas. Apague el equipo cuando el tanque llegue al nivel máximo. (fig. 3-7)
- 8 Retire la Tapa embudo del recipiente y Tápelo con su tapa y Guárdelo. Se recomienda guardar el recipiente en el refrigerador para extender la calidad del agua. (fig 3-8)
- 9 Una vez que se haya enfriado (30 m) retire el cable de la cobertura superior, ábrala y limpie. Después de la limpieza, ármelo, conecte el cable nuevamente y póngalo en su lugar habitual.

Nota. El equipo tiene un sistema de seguridad en caso de funcionar en seco. No se dañará. Dejarlo enfriar y proseguir como corresponde.



Fig 3-1



Fig 3-2



Fig 3-3



Fig 3-4



Fig 3-5

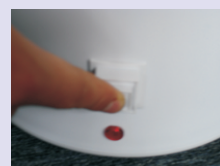


Fig 3-6



Fig 3-7

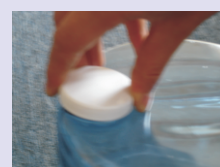


Fig 3-8

3 Mantenimiento

- ❶ Después de cada uso, retire la salida de agua (water outlet), vierta el agua en el condensador dentro de la cubierta superior seca, y luego limpie el fondo de la Cubierta superior seca. (fig 5-1)
- ❷ Limpiar suavemente con un limpiador neutro y mantener seco.
- ❸ Limpie diariamente, con agua limpia, las impurezas del estanque de acero.
- ❹ Remueva la suciedad con un limpiador recomendado en forma mensual.
 - 1.- Rellene el estanque con agua caliente ligeramente por sobre la suciedad y calcificación.
 - 2.-Vierte de 1 a 4 cucharas de té con el detergente dependiendo de la cantidad de suciedad.
 - 3.-No cubra la cobertura superior, conéctela a la corriente, presione el botón de encendido para calentar el barril de acero.
 - 4.-Bote el agua después de unos 30 minutos y limpie el interior con agua limpia.
 - 5.-Puede repetir el proceso si aún hay suciedad.
 - 6.-La suciedad que pudiese mantenerse en el fondo del tambor no es peligrosa para la salud. Puede utilizar el equipo sin problemas.
- ❺ Reemplazar el filtro de la tapa cada dos meses.



Fig5-1



Fig5-2

4 Garantía


Garantía 1 año

Las siguientes situaciones no se consideran cubiertas por la garantía.

- ❶ El equipo dañado por mal manejo, transporte, instalación o utilización.
- ❷ Producto intervenido.
- ❸ Facturas alteradas, falsificadas o ausencia de ella.
- ❹ No seguimiento de las instrucciones.
- ❺ Voltaje no correcto, Incendio u otro factor externo.

5 Accesorios

Seria Inumber	name	unit	quantity
1	Water tank	PC	1
2	Water outlet	PC	1
3	Water inlet	PC	1
4	Cleaning powder (optional)	PC	1
5	Power cable	PC	1
6	Operation Manual	PC	1

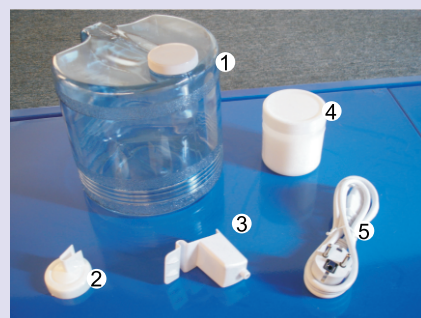

Ningbo Runyes Medical Instrument Co., Ltd.

Add: No. 456, Tonghui Road, Jiangbei Investment
& Pioneering Park C, 315033, Ningbo, China

Tel : +86-574-27709922
Email: runyes@runyes.com

Fax: +86-574-27709923
<http://www.runyes.com>